



Kombinationsmöglichkeiten
Ergänzung zur
Gebrauchsanweisung der
Sterilisationscontainer



Dornierstraße 49
78532 Tuttlingen / Germany
Tel: +49 (0) 7461/964857-50
Fax: +49 (0) 7461/964857-99
info@ermis-medizintechnik.de



1 KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

DECKEL

ER100.010xx

Größe		
Zahl	Größe	Bezeichnung
1	1/1	Große
2	3/4	Mittlere
3	1/2	Halbe
4		Mini
5		Dental

Farbe	
1	Silber
2	Gelb
3	Rot
4	Blau
5	Grün
6	Schwarz

Containertyp	
E	E-Model
ER	ER-Model
TB	TUT-Premium Model
PA	3-in-one Aluminium, PTFE-System
BA	3-in-one Aluminium, Barriere-System
VA	3-in-one Aluminium, Ventil-System

WANNE

ER105.100E(Rx)

Größe		
Zahl	Größe	Bezeichnung
1	1/1	Große
2	3/4	Mittlere
3	1/2	Halbe
4		Mini
5		Dental
5		½ Dental
5		Maxi ½ Dental

5	Wanne ungelocht
6	Wanne gelocht

Höhe in mm

Farbe	
ERx = Neue Container	
ER1	Silber
ER2	Gelb
ER3	Rot
ER4	Blau
ER5	Grün
ER6	Schwarz
ER7	Dunkelgrau

SET-ARTIKELNUMMER

0	Gerade Zahl	Wanne ungelocht
1	Ungerade Zahl	Wanne gelocht

ER410.070E

Größe	
Zahl	Bezeichnung
4	Mini
5	Dental
5	½ Dental

Farbe	
1	Silber
2	Gelb
3	Rot
4	Blau
5	Grün
6	Schwarz

Höhe in mm

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN DECKEL UND WANNE

Wannen lassen sich nur mit Deckeln innerhalb einer Modellgröße kombinieren, z.B.

Wannen	Deckel	Beschreibung
ER10x.xxxE ER10x.xxERx	ER100.0x0E	Deckel der Größe 1/1 können nur mit Wannen der Größe 1/1 kombiniert werden.
	ER100.0x0ER	
	ER100.0x0TB	Diese Deckel der Größe 1/1 dürfen nur mit ungelochten Wannen der Größe 1/1 verwendet werden
	ER100.0x0PA	
	ER100.0x0BA ER100.0x0VA	
ER20x.xxxE ER20x.xxERx	ER200.0x0E	Deckel der Größe 3/4 können nur mit Wanne der Größe 3/4 kombiniert werden.
	ER200.0x0ER	
	ER200.0x0TB	Diese Deckel der Größe 3/4 dürfen nur mit ungelochten Wannen der Größe 3/4 verwendet werden
	ER200.0x0PA	
	ER200.0x0BA ER200.0x0VA	
ER30x.xxxE ER30x.xxERx	ER300.0x0E	Deckel der Größe 1/2 können nur mit Wannen der Größe 1/2 kombiniert werden.
	ER300.0x0ER	
	ER300.0x0TB	Diese Deckel der Größe 1/2 dürfen nur mit ungelochten Wannen der Größe 1/2 verwendet werden
	ER300.0x0PA	
	ER300.0x0BA ER300.0x0VA	
ER40x.xx0E	ER400.0x0E ER400.0x0TB	Deckel der Größe Mini können nur mit Wannen der Größe Mini kombiniert werden.
ER50x.xx0E	ER500.0x0E ER500.0x0TB	Deckel der Größe Dental können nur mit Wannen der Größe Dental kombiniert werden.

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN CONTAINER & SIEBKÖRBE

Um den passenden Siebkorb für einen Sterilisationscontainer zu finden, müssen die folgenden Punkte beachtet werden:

- Maße vom Container
- Maße vom Siebkorb
- Für die Filterhalterung im Deckel müssen mindestens 10 mm vom Innenmaß abgezogen werden
- Bei Kleinsetcontainern (z.B. Mini, Dental, ...) müssen mindestens 3 mm vom Innenmaß abgezogen werden
- Bei einem Container mit gelochtem Boden müssen nochmal mindestens 3 mm für die Filterhalterung in der Wanne vom Innenmaß abgezogen werden.
- Bei gelochten Wannen sollte der Siebkorb nicht auf der Filterhalterung aufliegen. Dies wird z.B. durch die Verwendung von Füßen erreicht.
- Bei 3-in-one und TUT-Premium-Deckeln dürfen nur ungelochte Wannen verwendet werden.
- Die maximale Containerbeladung gemäß der Gebrauchsanweisung ist einzuhalten.

Solange die o.g. Punkte beachtet werden, können nach Bedarf Siebkörbe mit verschiedenen Höhen in einem Container gestapelt werden.

Im Folgenden ist pro Spalte für einen Siebkorb eingetragen, wie viele Einheiten dieses Artikels ggf. in Kombination mit anderen Siebkörben in die in der Überschrift benannte Containerwanne passen. Pro Zeile wird also eine mögliche Kombination aus Siebkörben für eine bestimmte Containerwanne angezeigt.

Da für fast jede Containergröße eine entsprechende Siebkorbgröße zur Verfügung steht, wurden für die verschiedenen Wannen-Modelle (z.B. E-Model, ER-Model, Dental, Mini, ...) die Kombinationsmöglichkeiten je Siebkorbart zusammengefasst.

Dies wird in der jeweiligen Überschrift durch das x dargestellt (z.B. ERx05.260E $\triangleq$ ER105.260E, ER305.260E).

Beispiel:


Wanne ER205.150E soll mit Siebkörben bestückt werden:

- ➔ Seite 9
- ➔ Mögliche Kombinationen
 - 4x ER290.030
 - 2x ER290.030 und 1x ER290.070
 - 1x ER290.100
 - 3x ES380.030

Beispielabbildungen:



Beispiel 1:
Siebkorb ER290.100 alleine in Wanne
ER205.150E

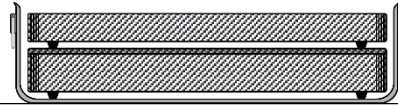

Beispiel 2:
Siebkorb ER290.100 mit Deckel und
ER290.070 in Wanne ER205.200E

Kombinationsmöglichkeiten:

Containerwannen mit 260er-Höhe – ungelocht (ERx05.260ERx)

Gültig für ER105.260E, ER305.260E, ER105.260ERx, ER305.260ERx

Drahtsiebkörbe			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	8
-	-	1	7
-	-	2	5
-	-	3	3
-	-	4	2
-	-	5	-
-	1	-	6
-	1	1	4
-	1	2	2
-	1	3	1
-	2	-	3
-	2	1	2
-	2	2	-
-	3	-	1
1	-	-	5
1	-	1	3
1	-	2	1
1	-	3	-
1	1	-	2
1	1	1	-
1	2	-	-
2	-	-	1

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	7
-	-	1	5
-	-	2	4
-	-	3	2
-	-	4	1
-	1	-	5
-	1	1	3
-	1	2	2
-	1	3	-
-	2	-	3
-	2	1	1
-	3	-	-
1	-	-	4
1	-	1	2
1	-	2	1
1	1	-	2
1	1	1	-
2	-	-	1

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	7
-	-	1	5
-	-	2	4
-	-	3	2
-	-	4	-
-	1	-	5
-	1	1	3
-	1	2	1
-	1	3	-
-	2	-	2
-	2	1	1
-	3	-	-
1	-	-	4
1	-	1	2
1	-	2	-
1	1	-	1
1	1	1	-
2	-	-	-

FORTSETZUNG: CONTAINERWANNEN MIT 260ER-HÖHE – UNGELOCHT (ERX05.260ERX)

SIEBKÖRBE MIT FÜßEN:

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	5
-	-	1	4
-	-	2	2
-	-	3	1
-	1	-	3
-	1	1	2
-	1	2	-
-	2	-	1
-	2	1	-
1	-	-	2
1	-	1	1
1	-	2	-
1	1	-	1
2	-	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	5
-	-	1	4
-	-	2	2
-	-	3	1
-	1	-	3
-	1	1	2
-	1	2	-
-	2	-	1
-	2	1	-
1	-	-	2
1	-	1	1
1	1	-	-
2	-	-	-

Containerwannen mit 260er-Höhe – gelocht (ERx06.260ERx)

Gültig für ER106.260E, ER306.260E, ER106.260ERx, ER306.260ERx

Drahtsiebkörbe mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	8
-	-	2	5
-	-	3	3
-	1	1	4
-	1	2	2
-	2	-	3
-	2	2	-
1	-	1	3
1	-	2	1
1	1	-	2
1	1	1	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	5
-	-	1	3
-	-	2	2
-	-	3	1
-	1	-	3
-	1	1	2
-	1	2	-
-	2	-	1
-	2	1	-
1	-	-	2
1	-	1	1
1	-	2	-
1	1	-	-
2	-	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	5
-	-	1	4
-	-	2	2
-	-	3	1
-	1	-	3
-	1	1	2
-	1	2	-
-	2	-	1
-	2	1	-
1	-	-	2
1	-	1	1
1	1	-	-
2	-	-	-

Containerwannen mit 200er-Höhe – ungelocht (ERx05.200ERx)

Gültig für: ER105.200E, ER205.200E, ER305.200E, ER105.200ERx, ER205.200ERx, ER305.200ERx

Drahtsiebkörbe			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	6
-	-	1	4
-	-	2	3
-	-	3	1
-	1	-	4
-	1	1	2
-	1	2	-
-	2	-	1
1	-	-	2
1	-	1	1
1	1	-	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	5
-	-	1	4
-	-	2	2
-	-	3	-
-	1	-	3
-	1	1	1
-	1	2	-
-	2	-	1
1	-	-	2
1	-	1	-
1	1	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	5
-	-	1	4
-	-	2	2
-	-	3	-
-	1	-	3
-	1	1	1
-	1	2	-
-	2	-	1
1	-	-	2
1	-	1	-
1	1	-	-

SIEBKÖRBE MIT FÜßEN:

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	4
-	-	1	2
-	-	2	1
-	1	-	2
-	1	1	-
-	2	-	-
1	-	-	1
1	-	1	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	4
-	-	1	2
-	-	2	1
-	1	-	2
-	1	1	-
-	2	-	-
1	-	-	1
1	-	1	-

Containerwannen mit 200er-Höhe – gelocht (ERx06.200ERx)

Gültig für ER106.200E, ER206.200E, ER306.200E, ER106.200ERx, ER206.200ERx, ER306.200ERx

Drahtsiebkörbe mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	6
-	-	1	4
-	-	3	1
-	1	1	2
-	1	2	-
-	2	-	1
1	-	-	2
1	1	-	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	4
-	-	1	2
-	-	2	1
-	1	-	2
-	1	1	-
-	2	-	-
1	-	-	1
1	-	1	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	4
-	-	1	2
-	-	2	1
-	1	-	2
-	1	1	-
-	2	-	-
1	-	-	1

Containerwannen mit 150er-Höhe – ungelocht (ERx05.150ERx)

Gültig für: ER105.150E, ER205.150E, ER305.150E, ER105.150ERx, ER205.150ERx, ER305.150ERx

Drahtsiebkörbe			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	4
-	-	1	2
-	-	2	1
-	1	-	2
-	1	1	-
1	-	-	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	3
-	-	1	2
-	-	2	-
-	1	-	1
-	1	1	-
1	-	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	4
-	-	1	2
-	-	2	-
-	1	-	1
-	1	1	-
1	-	-	-

SIEBKÖRBE MIT FÜßEN:

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	-	2	-
-	1	-	1
1	-	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	1	-	-
1	-	-	-

Containerwannen mit 150er-Höhe – gelocht (ERx06.150ERx)

Gültig für ER106.150E, ER206.150E, ER306.150E, ER106.150ERx, ER206.150ERx, ER306.150ERx

Drahtsiebkörbe mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	4
-	-	1	2
1	-	-	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	-	2	-
-	1	-	-
1	-	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	1	-	-
1	-	-	-

Containerwannen mit 135er-Höhe – ungelocht (ERx05.135ERx)

Gültig für: ER105.135E, ER205.135E, ER305.135E, ER105.135ERx, ER205.135ERx, ER305.135ERx

Drahtsiebkörbe			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	3
-	-	1	2
-	-	2	-
-	1	-	1
1	-	-	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	3
-	-	1	1
-	-	2	-
-	1	-	1
1	-	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	3
-	-	1	1
-	-	2	-
-	1	-	1
1	-	-	-

SIEBKÖRBE MIT FÜßEN:

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	1	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	1	-	-

Containerwannen mit 135er-Höhe – gelocht (ERx06.135ERx)

Gültig für ER106.135E, ER206.135E, ER306.135E, ER106.135ERx, ER206.135ERx, ER306.135ERx

Drahtsiebkörbe mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	3
-	-	2	-
-	1	-	1

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	2
-	-	1	1
-	1	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)

ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	2
-	-	1	-
-	1	-	-

Containerwannen mit 100er-Höhe – ungelocht (ERx05.100ERx)

Gültig für: ER105.100E, ER205.100E, ER305.100E, ER105.100ERx, ER205.100ERx, ER305.100ERx

Drahtsiebkörbe			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	2
-	-	1	-
-	1	-	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	2
-	-	1	-
-	1	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	2
-	-	1	-
-	1	-	-

SIEBKÖRBE MIT FÜßEN:

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	2
-	-	1	-
-	1	-	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	1
-	-	1	-

Containerwannen mit 100er-Höhe – gelocht (ERx06.100ERx)

Gültig für ER106.100E, ER206.100E, ER306.100E, ER106.100ERx, ER206.100ERx, ER306.100ERx

Drahtsiebkörbe mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ER191.100 / ERx90.100	ER191.070 / ERx90.070	ER191.050 / ERx90.050	ER191.030 / ERx90.030
-	-	-	2
-	-	1	-

Edelstahlsiebkörbe perforiertes Blech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES181.100 / ESx80.100	ES181.070 / ESx80.070	ES181.050 / ESx80.050	ES181.030 / ESx80.030
-	-	-	1
-	-	1	-

Siebkörbe aus Edelstahl Lochblech mit Kunststoff Füßen (ES390.005, Höhe 10 mm)			
ES191.100 / ESx90.100	ES191.070 / ESx90.070	ES191.050 / ESx90.050	ES191.030 / ESx90.030
-	-	-	1
-	-	1	-

Containerwannen Dental, Mini, Maxi 1/2 Dental, 1/2 Dental

Ja= Füße verwendbar (am untersten Siebkorb anzubringen)

Dental

	Siebkörbe							Deckel (optional)	Füße ES390.005 (optional)
	ER398.030 (inkl. Deckel)	ES580.050	ES580.070	ES582.050	ER590.045	ES590.050	ER592.054		
ER505.040E	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ER505.060E	-	1	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	-	-	1	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	ES590.000	-
	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ER505.080E	-	1	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	-	1	-	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ER505.100E	-	2	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	-	1	-	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	2	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	-	-	2	-	ES590.000	-
ER505.130E	-	2	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	3	-	-	-	-	-	ES580.010	-
	-	-	1	1	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	3	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3	-	ES590.000	-
	-	-	-	-	-	-	2	-	-
ER506.060E	-	1	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	-	-	1	-	-	-	ES582.010	Ja
	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	ES590.000	Ja
	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ER506.080E	-	1	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	-	-	1	-	-	-	ES582.010	Ja
	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	1	-	ES590.000	Ja
	-	-	-	-	-	-	1	-	-

Siebkörbe (Fortsetzung Dental)									
	ER398.030 (inkl. Deckel)	ES580.050	ES580.070	ES582.050	ER590.045	ES590.050	ER592.054	Deckel (optional)	Füße ES390.005 (optional)
ER506.100E	-	1	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	2	-	-	-	-	-	ES580.010	-
	-	-	1	-	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	2	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	-	1	-	-	-	-
ER506.100E	-	-	-	-	-	2	-	ES590.000	-
	-	-	-	-	-	-	1	-	-
ER506.130E	-	3	-	-	-	-	-	ES580.010	Ja
	-	-	2	2	-	-	-	ES582.010	-
	-	-	-	3	-	-	-	ES582.010	Ja
	-	-	-	3	-	-	-	ES590.000	Ja
	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	3	-	ES590.000	-
	-	-	-	-	-	-	2	-	-

Mini

Siebkörbe							Füße ES390.005 (optional)
	ES490.020	ER490.050	ER490.025	ES480.050	ES480.070	Deckel (optional)	
ER405.040E	1	-	-	-	-	-	-
ER405.070E	-	1	-	-	-	ES490.000	-
	-	-	2	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	ES480.010	-
ER405.100E	-	1	-	-	-	ES490.000	-
	-	1	1	-	-	-	-
	-	-	3	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	ES480.010	-
	-	-	-	-	1	ES480.010	-
ER406.070E	-	1	-	-	-	-	-
ER406.100E	-	1	-	-	-	ES490.000	Ja
	-	1	1	-	-	-	-
	-	-	3	-	-	-	-
	-	-	-	1	-	ES480.010	Ja
	-	-	-	-	1	ES480.010	-

Maxi 1/2 Dental

	Siebkörbe		Deckel (optional)	Füße ES390.005 (optional)
	ES585.040	ER590.020		
ER507.060E	1	-	ES585.010	-
ER507.073E	1	-	ES585.010	-
ER507.100E	2	-	ES585.010	-
ER507.130E	3	-	ES585.010	-
ER508.060E	-	1	ES585.010	Ja
ER508.100E	-	2	ES585.010	Ja
ER508.130E	-	3	ES585.010	Ja

1/2 Dental

	Siebkörbe		Deckel (optional)	
	ER590.035	ES584.030		
ER505.050E	1	-	-	
	-	1	ES584.010	

Containerwannen Großraum Container und XL-Container

Großraum Container

	Siebkörbe	
	ER190.55	ER191.60
ER105.62E	1	-
ER105.68E	3	-
ER106.62E	1	-
ER106.68E	2	-
	-	1

XL-Container

	Siebkörbe			
	ES160.100	ER198.050	ER198.070	ER198.100
ER105.70E	1	-	-	-
	-	2	-	-
	-	-	1	-
	-	-	-	1
ER105.71E	1	-	-	-
	-	3	-	-
	-	-	2	-
	-	-	-	1
	-	1	-	1
ER106.70E	-	1	-	-
	-	-	1	-
ER106.71E	1	-	-	-
	-	2	-	-
	-	-	2	-
	-	-	-	1

Containerwannen Endocontainer:

Endo-Container

	Siebkörbe				
	ER600.040	ER691.040	ES696.000	ES696.030	ES697.030
ER605.080	1	-	-	-	
	-	1	-	-	
	-	-	1	-	
	-	-	-	1	
	-	-	-	-	1
ER605.100	1	-	-	-	
	-	1	-	-	
	-	-	1	-	
	-	-	-	1	
	-	-	-	-	1
ER606.080	-	-	1	-	
	-	-	-	1	
	-	-	-	-	1